

お客様 各位

不織布マスク 全国販売のご案内

【販売開始の背景と製品特長】

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大の終息が見通せない中、医療・介護の現場を支えておられる皆さまに対し、貢献させて頂く領域の幅を広げたいと考え、弊社と協働しているVinda International Holdings Limitedが製造する不織布マスクを販売することとなりました。

今回販売致します「不織布マスク」はASTM（米国試験材料協会）規格に従って設計され、高機能フィルターや立体三層構造、改良を重ねた耳にやさしいフックで安全で安心できる製品となります。

少しでもご自身用に、ご家族様用に、関わる全ての方々の日々の感染予防対策にお役立ていただければと思います。

1. 製品名 「不織布マスク」
2. 製造元 VINDA PAPER (CHINA) CO LTD.
3. 販売単位 **ケース単位**
4. 注文書 注文書の「その他製品」欄に「製品名、製品番号、ケース数」をご記入下さい。
5. 入数、コード、外寸等

製品名	製品番号	JANコード	ITFコード	入数/ケース
不織布マスク	VC9013	6901236388839	1690123638836	40枚（60内箱）入り

外寸							
製品		内箱			ケース		
縦(mm)	横(mm)	縦(mm)	横(mm)	奥行(mm)	縦(mm)	横(mm)	奥行(mm)
95	175	85	185	100	450	635	395

6. 製品画像 販売単位 ケース単位 2400枚（40枚×60内箱）

*製品



*内箱



*ケース



【本件お問合せ】

■電話：0120-107-586（TENAお客様相談室 月-金曜日 10:00-16:30（土日祝除く））

■メールアドレス：ucm-mail@ucm-kk.com

（現在テレワーク対応に伴いまして、お問合せメール又は弊社ホームページのお問い合わせフォームからご入力をお願いしております。）

製品の発売・変更等については、弊社ホームページ [www.tena.co.jp] でもご案内しております。

TENA製品切替案内 で検索すると便利です。

「日常的に使用したい」
という声
多数頂いております

“不織布マスク”


ASTM F2100-19 レベル1 適合



長時間使用しても快適なつけ心地



耳が痛くなりにくい伸縮性のある平らなゴムを使用

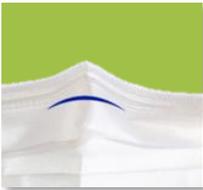

調節が可能なノーズフィッターでぴったりフィットし眼鏡も曇りにくい



BFE
カット
≥99%



安全に使用して頂きたいから ASTM規格に従って設計


レベル1の基準値を上回り合格しております

ASTM F2100-19 基準表

テスト名	レベル1	レベル2	レベル3
細菌ろ過率 (BFE, %)	≥95	≥98	≥98
呼吸抵抗 (Delta P, mmH2O/cm2)	<5.0	<6.0	<6.0
微粒子ろ過率 (PFE, %)	≥95	≥98	≥98
血液不浸透性(mmHg)	≥80mmHg (最小速度)	≥120mmHg (最小速度)	≥160mmHg (最小速度)
延燃性	クラス1	クラス1	クラス1



高性能フィルターと立体三層構造

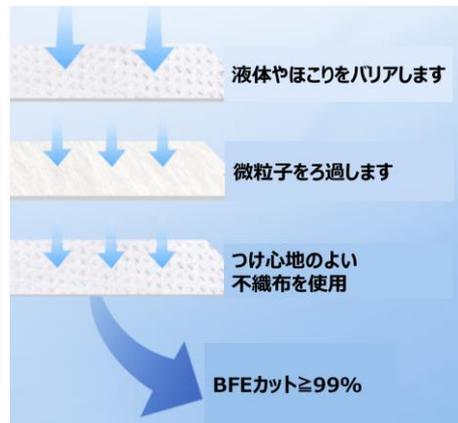

使用している不織布は、毛羽立ちにくく、通気性に優れています。

立体三層構造によって、液体やほこりだけでなく微粒子もバリアします。

1内箱40枚入り

素材

本体:ポリプロピレン 100%
耳ひも部:ポリウレタン 5.2% ポリエステル 94.8%
ノーズフィッター:鉄 50% ポリプロピレン 50%



使用方法

- ①ゴムひもの接着部のあるほうを外側にし、ブリーツを広げます。
- ②マスクを顔に当て、耳ゴムをかけてください。
- ③ノーズフィッターを鼻の形に合わせ、マスクと顔の間に隙間がないようマスクを調整してください。

注意事項

- ①本製品はASTM F2100-19 レベル1 適合となります。
- ②本製品は簡易マスクのため、有毒な粉塵やガス等が発生する場所での使用はしないでください。
- ③気分が悪くなった場合やかぶれなどの症状が現れた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
- ④乳幼児の手の届かない所で保管してください。
- ⑤本品は使いきり商品のため、洗濯による再利用はおやめください。
- ⑥火気のそばでのご使用はおやめください。

【本件お問合せ先】 ユニ・チャーム メンリッケ 株式会社

- 電話: 0120-107-586 (TENAお客様相談室 月-金曜日 10:00-16:30(土日祝除く))
- メールアドレス: ucm-mail@ucm-kk.com (現在テレワーク対応に伴いまして、お問合せメール又は弊社ホームページのお問合せフォームからご入力をお願いしております。)