

TENAサージカルマスク 変更ご案内

(入り数変更に伴い、製品番号・JAN/ITFコード、内箱デザイン、ケースサイズの変更)

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、TENAサージカルマスクについて下記の通り切替を実施させていただきますので、ご案内申し上げます。

敬具

記

1. 製品名 TENAサージカルマスク
2. 切替時期 2022年5月23日(月) 出荷分より
3. 入り数 **60内箱(2400枚) → 30内箱(1200枚)**
4. コード [製品番号]変更あり [JAN・ITFコード]変更あり
5. 注文書 現行の注文書を引き続きご利用頂き、
空白部分に「TENAサージカルマスク 30内箱」と記入ください。
※販売単位に変更はありません。ケース単位(1200枚 40枚×30内箱)でのご発注をお願いします。
6. 変更内容 入り数、販売価格、製品番号・JAN・ITFコード、内箱デザイン、ケースサイズ
※価格については、購入元にご確認ください。

● 変更内容

製品名	製品番号 (現)	JANコード (現)	ITFコード (現)	ケースサイズ 縦×横×奥行mm
TENAサージカルマスク	NC7901	6901236330869	16901236330866	450×635×395

製品名	製品番号 (新)	JANコード (新)	ITFコード (新)	ケースサイズ 縦×横×奥行mm
TENAサージカルマスク	NC7902	6901236330999	16901236330996	282×535×395

● ケースデザイン



2400枚 (40×60内箱)



1200枚 (40×30内箱)

● 内箱デザインと製品について

JIS適合表示した改訂品(新パッケージ品)の従来品との違いは、JIS適合表示フォーマットの有無とその記載に伴う文言の修正のみです。



[本件お問い合わせ先]

■製品: 0120-107-586 (TENAお客様相談室、月-金曜10:00-16:30(土日祝除く))

■代表電話 03-5772-0190 (月-金曜9:00-17:00(土日祝除く))

製品の発売・変更等については、弊社ホームページ [www.tena.co.jp] でもご案内しております。

TENA製品切替案内



で検索すると便利です。



TENA サージカルマスク

(JIS適合審査にて医療用マスククラスⅡに適合と審査されました)



長時間使用しても快適なつけ心地



耳が痛くなりにくい伸縮性のある平らなゴムを使用



調節が可能なノーズフィッターでぴったりフィットし眼鏡も曇りにくい

素材


本体:ポリプロピレン 100%
耳ひも部:ポリウレタン 5.2% ポリエステル 94.8%
ノーズフィッター:鉄 50% ポリプロピレン 50%



1200枚 (40枚×30内箱)



高性能フィルターと立体三層構造

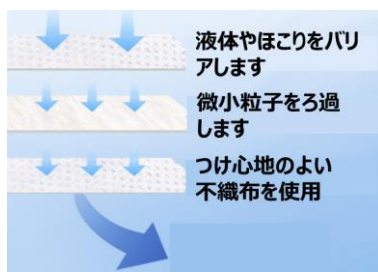

液体やほこりをバリアします

微小粒子をろ過します

つけ心地のよい不織布を使用

使用している不織布は、毛羽立ちにくく、通気性に優れています

立体三層構造によって、液体やほこりだけでなく微小粒子もバリアします

注意事項

- ①本製品は簡易マスクのため、有毒な粉塵やガス等が発生する場所での使用はしないでください。
- ②肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹等の症状があらわれたときは、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
- ③匂いで気分がわるくなった場合には、使用を中止してください。
- ④乳幼児の手の届かない所で保管してください。
- ⑤本品は使いきり商品のため、洗濯による再利用はおやめください。
- ⑥火気のそばでのご使用はおやめください。

使用方法

- ①ゴムひもの接着部のあるほうを外側にし、プリーツを広げます。
- ②マスクを顔に当て、耳ゴムをかけてください。
- ③ノーズフィッターを鼻の形に合わせ、マスクと顔の間に隙間がないようマスクを調整してください。

【本件お問合せ先】 ユニ・チャーム メンリッケ 株式会社

- 電話: 0120-107-586 (TENAお客様相談室 月-金曜日 10:00-16:30(土日祝除く))
- 代表電話: 03-5772-0190 (月-金曜日 9:00-17:00(土日祝除く))