



暑い夏の
TENA保管方法



TENA製品を良い状態でご使用いただくために



安全に心地よくご使用いただくために

猛暑の時期のTENA製品の保管方法について

Q. 猛暑の時期、TENAのパッド類(おむつ)の保管について気をつけることはありますか？

A. 極端に高温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。段ボール箱や袋パッケージの開封・未開封に関わらず、素材を傷めたり変色してしまうなど劣化につながります。

【使用期限】未開封で製造後3年間は使用可能です。

Q. パッドの外側にある黄色いインジケーターが使用前に青緑っぽく変色しているのですが？

A. インジケーター(交換表示ライン)は湿気や水分に敏感に反応して黄色から青緑色に色が変わります。段ボール箱や袋パッケージが未開封の状態でも、大気中の湿気を吸って、黄色いラインが部分的にポツポツと点状に青くなることがあります。

一部変色していても、排尿があると全体が青緑色になってお知らせしますので安全性や機能には問題はありません。

Q. 猛暑の時期、TENAの化粧品類の保管について気をつけることはありますか？

A. 化粧品に分類されるTENAウォッシュクリーム、バリアクリーム、ウェットワイプは極端に高温または低温、直射日光のあたる場所には保管しないでください。涼しく乾燥した場所が適しています。推奨保管温度は0度から30度です。

【使用期限】

ウォッシュクリーム:製造日から3年、開封後1年

バリアクリーム:製造日から3年、開封後2年

ウェットワイプ:製造日から2年

Q. 猛暑の時期、TENAのウェットタイプ製品の保管について気をつけることはありますか？

A. TENAクリーンケア ウェットシート、トイレに流せるウェットシートは、極端に高温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。シートが乾いて変色した場合は、変色したシートを取り除いてご使用ください。

【使用期限】

クリーンケア ウェットシート:製造日から3年

トイレに流せるウェットシート:製造日から3年